

Speichelprobenahme für die Drogenanalytik

KURZANLEITUNG

Vor der Speichelprobenahme sollte mindestens 30 Minuten lang **weder gegessen noch getrunken** sowie die **Einnahme von Medikamenten** und das **Rauchen** vermieden werden.

Bitte beachten Sie, dass bei Substituierenden die Probenahme vor der nächsten oralen Gabe erfolgt.


Schritt 1: Gewinnung und Sammlung des Speichels durch die betroffene Person



Kaugummi ① aus dem Blister in den Mund überführen **ohne** den Kaugummi mit der Hand zu berühren.




1- 2 min kauen oder bis genügend Speichel produziert ist.

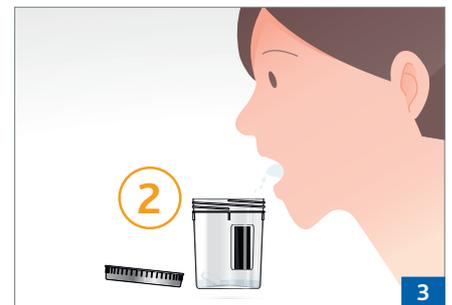

Mit Barcode beklebten **Sammelbecher** ② öffnen und den **Speichel (inkl. Kaugummi)** **dort hineinspucken** (bei Bedarf mehrmals spucken).

Schritt 2: Probenbereitstellung und Laboranforderung durch das Fachpersonal

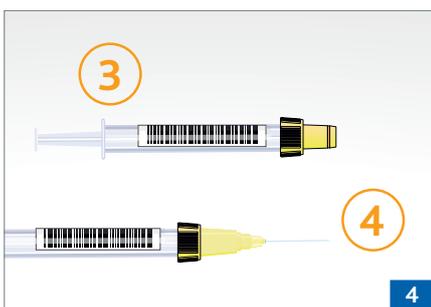

Kennzeichnung der NaF-Monovetten ③ mit einem Barcode.


Die **Kanülen** ④ jeweils auf die Monovetten aufsetzen.



Gewinnung der A + B Probe durch Aufziehen in die Monovetten: **mind. 0,2 ml bis max. 1,2 ml je Monovette**.

Den Becher mit restlichem Speichel und Kaugummi verwerfen.

Kanüle und Monovettenstempel entsorgen.

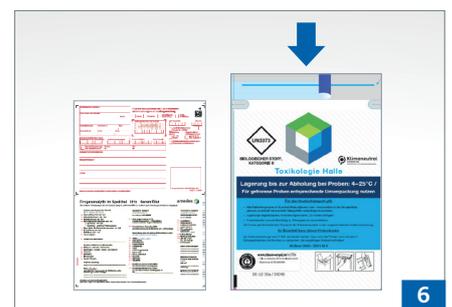

Die **Laboranforderung** ausfüllen. (Toxikologie-Anforderungsschein, KV Überweisungsschein oder digital über Order-Entry)

Die Proben (mit dem Schein) in den **blauen Toxikologie Halle-Probentransportbeutel** geben. Den Beutel fest verschlossen an das Labor senden.

Materialien für die Speichelprobenahme und den Versand

Diese Materialien können Sie kostenfrei bei uns anfordern.

Materialien pro Probenahme		Hinweise
1x Medizinischer Kaugummi ①		Zur Speichelproduktionsförderung (enthält keine tierischen Bestandteile)
1x Sammelbecher (versiegelt) ②		Bitte das Siegel von dem Probanden brechen und den Becher öffnen lassen.
2x NaF-Monovetten/1,2 ml ③		Für die A und B Probe (je mind. 0,2 ml bis max. 1,2 ml befüllt)
2x S-Monovetten-Kanüle (20 G) ④		Zum Aufsatz auf die NaF-Monovetten

Probenbarcodes

- Für die Probanden-/Probenidentifikation

Laboranforderungsschein (Alternativen)

- Toxikologie-Anforderungsschein (auch zum Download auf unserer Webseite – siehe QR-Code)
- KV Überweisungsschein
- Digitale Anforderung über unser Order-Entry



Probentransportbeutel „Toxikologie Halle“

- Bitte verwenden Sie unbedingt den blauen „Toxikologie Halle“ Probentransportbeutel



**Haben Sie noch Fragen?
Sprechen Sie uns an!**

**amedes MVZ für Laboratoriumsdiagnostik und
Mikrobiologie Halle/Leipzig GmbH**

Fachbereich Toxikologie

Leipziger Chaussee 191f
06112 Halle

Telefon 0345.445 07 219
Telefax 0345.445 07 210

team-tox@amedes-group.com
www.amedes-halle-leipzig.de